

Die Anwendung des EquiHalers®

1. Vorbereitung

Der EquiHaler® wird zusammen mit einer Anwendungsbroschüre geliefert. Lesen Sie sich diese sorgfältig vor der ersten Verwendung des EquiHalers® durch.



Jeder neue EquiHaler® muss vor dem ersten Gebrauch einmalig aktiviert werden. Hierzu wird die Kartusche mit Kraft vollständig in den Handgriff gedrückt. Danach wird der Hebel einmal ganz gedrückt, und die Kartusche rutscht wieder ein kleines Stück aus dem Griff, bis die Füllstandsanzeige sichtbar wird.

2. Das Auslösen



Das Auslösen einer Sprühwolke besteht aus zwei Schritten:

1. Auslösehebel komplett durchdrücken und wieder loslassen.
2. Auslösehebel nur leicht antippen bis zum „Klick“.

WICHTIG: Vor dem ersten Verwenden eines neuen EquiHalers® am Pferd muss dieser Schritt 3mal durchgeführt werden, um das System zu befüllen.

3. Applikation



Der EquiHaler® wird mit der **linken Hand gehalten** und vorsichtig in die **linke Nüster** des Pferdes eingeführt. Er sitzt richtig, wenn sich die Membran des **Atemindikators** atemsynchron bewegt. Das Auslösen sollte zu **Beginn der Einatmung**, also wenn sich der **Atemindikator** nach innen wölbt, erfolgen. Gerne können während der Behandlung Leckerlies an das Pferd verfüttert werden.

4. Reinigung



Nach Verwendung muss der Nüsternadapter einfach unter fließendem Wasser ausgespült werden. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Der Adapter sollte 4h aufrecht an der Luft getrocknet werden. Er sollte nicht mit einem Handtuch getrocknet werden, da sich der Adapter sonst statisch auflädt.